

TECHNISCHES DATENBLATT

MediStream Set Infusionsgerät 180 cm

Merkmal	Technische Daten
Produktbezeichnung	MediStream Set Infusionsgerät 180 cm
Verwendungszweck	Schwerkraft-Infusion zur intravenösen Verabreichung von Infusionslösungen
Latexfrei	Ja
DEHP-frei	Ja (PVC FREE, falls Ihr Produkt PVC-frei ist)
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid (EO) sterilisiert
Schlauchlänge	180 ± 1 cm
Durchflussart	Regulierbarer Durchfluss mittels Rollenklemme
Filterart	Luftfilter + Flüssigkeitspartikelfilter
Belüftungsart	Aktiv (Belüftungsventil mit bakterienhemmendem Luftfilter)
Tropfenkalibrierung	20 Tropfen = 1 ml
Größe Partikelfilter	8 µm
Außendurchmesser Schlauch	4,0 mm
Innendurchmesser Schlauch	3,0 mm
Verpackung	Sterile Einzelverpackung (Peel-Pack), anschließend im Karton
Verpackungsgröße	25 Stück pro PE Beutel / 100 Stück pro Versandkarton <i>(je nach Ihrer Standardverpackung)</i>
Normen	EN ISO 8536-4, EN ISO 10993, EN ISO 11135, EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 13485
Qualitätsmanagement	ISO 13485 zertifiziert
Medizinprodukt-Klasse	Klasse IIa gemäß MDR (EU) 2017/745
CE-Kennzeichnung	CE 0425
Hergestellt in	Italien

180*140mm


MediStream Set 180 cm

INFUSIONSGERÄT mit zweiteiliger Tropfkammer PHTHALATFREI
INFUSION SET with double drip chamber NO PHTHALATES

100 St. / Krt.

Art.-Nr.: 10082025 PZN-20162354

Medipharm
by Meditrade®

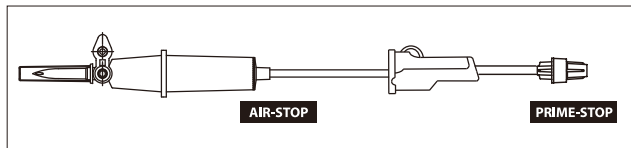

REF I0208FRLHDF/180
(D2L4005/180)
INFU-PRO

Meditrade-Medipharm GmbH
Zeller Berg 2, A-6330 Kufstein

PRO-ACTIVE S.r.l.
Viale del Commercio 12, Rovigo 45100, Italy


STERILE EO

CE
0425

8
µm
filter

20
ml
20 ± 1g ± 0,1g

P
Druck
pressure

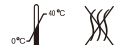

LOT

251110

2025-11-10

2030-11-09

UDI

(01)28034028275658
(11)251110
(17)301109
(10)251110

9 120136 1210560 >

99.0 mm

75.0 mm

MediStream Set 180 cm

INFUSIONSGERÄT mit zweiteiliger Tropfkammer PHTHALATFREI
INFUSION SET with double drip chamber NO PHTHALATES

100 St. / Krt. Medipharm
by Meditrade®

Art.-Nr.: 10082025 PZN-20162354

DE 1) führen Sie den Dorn in den Lösungsbehälter (Beutel oder Flasche) ein; 2) schließen Sie den Flow-Regler; 3) drehen Sie den Lösungsbehälter auf den Kopf; drücken Sie auf die Kammer, bis sie halb gefüllt ist; 4) öffnen Sie dann den Flow-Regler; 5) Öffnen Sie die Luftansaugkappe (im Falle einer Lösung in der Flasche); damit die Flüssigkeit fließen kann und entfernen Sie eventuell vorhandene Luftblasen. Vorsicht: Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, in direktem Sonnenlicht oder in extremen Temperaturen lagern. Nicht zur Verwendung bei Blut, zellulären Komponenten und hochviskösen Lösungen. Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung. Nur für die Anwendung durch geschultes Personal. Verwenden Sie das Set sofort nach dem Öffnen und Entfernen der Verpackung. Nicht wiederverwenden. Pyrogenfreiheit geprüft.

EN 1) Insert the dome into the solution container (bag or bottle); 2) close the flow control; 3) turn the solution container upside down; press the chamber until it is half full; 4) then open the flow control; 5) open the air intake cap (if there is a solution in the bottle); allow the liquid to flow and remove any air bubbles. Caution: Do not store in high humidity, direct sunlight, or extreme temperatures. Not for use with blood, cellular components, or highly viscous solutions. Do not use if the package is damaged. For use by trained personnel only. Use the set immediately after opening and removing the package. Do not reuse. If reused, the patient may be exposed to cross-infection. Tested for pyrogen-free status.

8 µm Filter (20 ± 1g ± 0,1g)

REF I0208FRLHDF/180
(D2L4005/180)
INFU-PRO

2025-11-10

LOT 251110

2030-11-09

UDI

(01)28034028275658
(11)251110
(17)301109
(10)251110

CE 0425

STERILE EO

Meditrade-Medipharm GmbH
Zeller Berg 2, A-6330 Kufstein

PRO-ACTIVE S.r.l., Viale del Commercio 12,
Rovigo 45100, Italy

9 120136 210553

226.0 mm

196.0 mm