




WBS NOTFALLDECKE

Selbstheizende Notfalldecke

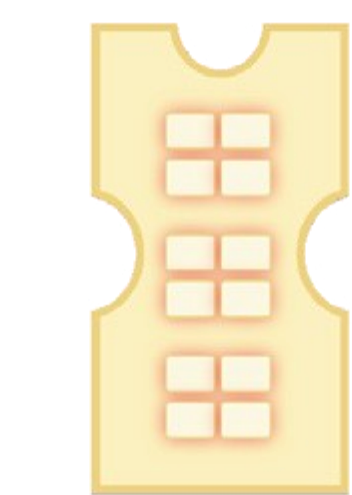

VERWENDEN SIE NICHT, WENN DAS PAKET BESCHÄDIGT IST


ENTSORGUNG Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Vorschriften und unter Einsicht in die von Ihrer Gemeinde bereitgestellten Richtlinien erfolgen. Die Tabelle rechts zeigt die Recyclingmethoden:	IFU UND SCHACHTELN	PAPIER		DECKE	RESTMÜLL	
	VAKUUMBEUTEL	KUNSTSTOFF		PATCHES	RESTMÜLL	

LEGENDE DER SYMBOLE

SYMBOL	BEDEUTUNG	SYMBOL	BEDEUTUNG
	HERSTELLER DES MEDIZINPRODUKTS		KENNZEICHNUNG MEDIZINPRODUKT
	CE-KENNZEICHNUNG		NICHT VERWENDEN, WENN DIE VERPACKUNG BESCHÄDIGT IST
	EINWEGPRODUKT, NICHT WIEDERVERWENDEN		ERFORDERLICH FÜR DIE MARKTÜBERWACHUNG
	CHARGENNUMMER		VERFALLSDATUM
	UDI CODE		REF-NUMMER
	NICHT STERIL		WARNHINWEISE
	ENTHÄLT KEINE PHTHALATE		ENTHÄLT KEINEN LATEX
	ACHTUNG: GEBRAUCHSANWEISUNG LESEN		TROCKEN LAGERN, VOR FEUCHTIGKEIT UND DIREKTEM SONNENLICHT SCHÜTZEN



Weitere Informationen finden Sie unter www.wbs.care

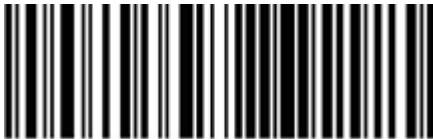


8033549310530

Referenz: [WBS0003](#)



Rev 0 - 12/2025

WBS NOTFALLDECKE

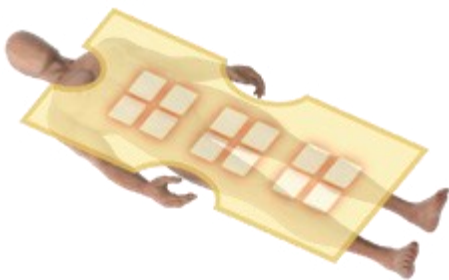

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Produkt WBS Emergency Blanket ist ein selbstheizendes, medizinisches Einweg-Notfallgerät, das für den Einsatz in Notsituationen entwickelt wurde, in denen die Vorbeugung oder Behandlung von Hypothermie und die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur unerlässlich sind. Seine Struktur und die fortschrittlichen Materialien machen es auch unter extremen Bedingungen wirksam und sicher.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Die WBS Emergency Blanket ist eine gebrauchsfertige Wärmequelle, die darauf ausgelegt ist, eine rasche und effektive Normothermie des Körpers zu unterstützen. Sie kann in allen Situationen eingesetzt werden, in denen eine Hypothermie verhindert oder behandelt und die Körpertemperatur kontrolliert werden muss, wie z. B. in der präklinischen Notfallversorgung, bei Rettungseinsätzen unter extremen klimatischen Bedingungen oder bei Erste-Hilfe-Maßnahmen an erwachsenen Personen (Alter > 18 Jahre). Es wird empfohlen, das Gerät durch Ersthelfer zu verwenden, auch ohne spezifische medizinische Ausbildung.

FUNKTIONSWEISE UND LEISTUNGSMERKMALE

Die WBS Emergency Blanket verwendet ein Selbstheizsystem, das auf einer exothermen chemischen Reaktion zwischen den Komponenten der Heiz-Patches basiert. Beim Kontakt mit Luft wird eine Reaktion zwischen Eisenpulver und atmosphärischem Sauerstoff ausgelöst, unterstützt durch zusätzliche Katalysatoren. Diese Reaktion erzeugt schnell und sicher Wärme, die sich gleichmäßig über die integrierten Taschen der Decke verteilt. Das SMS-Polypropylen-Gewebe bietet eine wirksame Wärmedämmung, optimiert die Wärmespeicherung und gewährleistet eine anhaltende Wärmeunterstützung für mehr als 14 Stunden.

ANWENDUNGSHINWEISE

Zur Verwendung der WBS Emergency Blanket folgende Schritte befolgen:

- Das Gerät vorsichtig aus der vakuumversiegelten Verpackung entnehmen, ohne die Decke zu beschädigen.
- Die Decke an die Luft legen, damit die Patches innerhalb von 15 Minuten ihre durchschnittliche Betriebstemperatur erreichen.
- Die Decke auf die bekleidete Person legen und sicherstellen, dass die markierte Seite („This side up“) nach außen zeigt. Das Gesicht darf niemals bedeckt werden.
- Die Decke in allen Notfallsituationen oder bei Erste-Hilfe-Eingriffen verwenden, in denen eine Hypothermie verhindert oder behandelt werden muss.
- Das Gerät ist einmalig verwendbar und muss nach Gebrauch ordnungsgemäß entsorgt werden.

VORSICHTSMASNAHMEN UND WARNHINWEISE

Allgemeine Warnhinweise

Für eine sichere und korrekte Verwendung der WBS Emergency Blanket folgende Hinweise beachten:

- Die Decke darf nur auf bekleideten Personen angewendet werden; direkter Hautkontakt ist zu vermeiden.
- Das Gesicht der Person niemals mit der Decke bedecken.
- Nicht in sauerstoffreichen Umgebungen verwenden, z. B. in hyperbaren Kammern oder in der Nähe von Sauerstofftherapiegeräten.
- Vor MRT- oder Röntgenuntersuchungen die Decke entfernen, da die Heizmaterialien die Diagnosegeräte stören können.
- Das Gerät ist Einwegmaterial und entfaltet nach Gebrauch keine Wirkung mehr. Es muss gemäß den geltenden Krankenhausrichtlinien entsorgt werden.
- Das Entlüften der Primärverpackung beeinträchtigt die Leistung des Geräts nicht.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann ernsthafte Gesundheitsrisiken für den Patienten verursachen.

Anwendungsvorsichtsmaßnahmen

Zur sicheren Verwendung sind die folgenden

Vorsichtsmaßnahmen erforderlich:

- Die richtige Seite der Decke ist mit „THIS SIDE UP“ gekennzeichnet und muss entsprechend positioniert werden.
- Auch wenn kein direkter Hautkontakt besteht (die Decke muss über der Kleidung angewendet werden), ist die Hautreaktion – insbesondere bei längerer Anwendung – regelmäßig zu überwachen.
- Direkten Kontakt mit der Haut bei offenen Wunden, Blutergüssen, Schwellungen, beginnender Erfrierung oder transdermalen Pflastern vermeiden. Die erzeugte Wärme kann die Freisetzung von Wirkstoffen aus transdermalen Systemen verstärken.
- Die Decke nicht falten oder zusätzlichen Druck/Gewicht darauf

- ausüben, einschließlich medizinischer Instrumente oder schwerer Gegenstände.
- Nicht anwenden bei Patienten mit schweren peripheren Durchblutungsstörungen, darunter:
 - schwere Hypotonie oder erwartete prolongierte Hypotonie
 - schwere periphere Gefäßerkrankungen
 - Aortenchirurgie oder distale Aortenklammung
 - schwere Herzinsuffizienz oder kardiogener Schock
- Nicht bei schwangeren oder stillenden Frauen ohne vorherige ärztliche Rücksprache verwenden.

GEGENANZEIGEN UND NEBENWIRKUNGEN

Bei Überempfindlichkeit, Hautirritationen oder Allergien ist die Anwendung sofort zu unterbrechen und ein Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Der Anwender muss etwaige Gegenanzeigen, Nebenwirkungen oder schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Gerät sowohl dem Hersteller (certificazioni@biozetatec.com) als auch der zuständigen Behörde des jeweiligen Mitgliedstaats melden.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Die WBS Emergency Blanket ist einzeln vakuumverpackt in Polyamid/Polyethylen-Beuteln, die die Produktintegrität und den Schutz vor Kontaminationen bis zur Verwendung gewährleisten. Das Gerät muss kühl und trocken, fern von Wärmequellen gelagert werden, die die Integrität beeinträchtigen könnten. Die Verpackung muss bis zur Verwendung geschlossen bleiben, um Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und externen Einflüssen zu gewährleisten. Die richtige Lagerung erhält die Wirksamkeit und Sicherheit des Produkts für die angegebene Dauer. Die Decke behält ihre Eigenschaften 48 Monate ab Herstellungsdatum, sofern die Verpackung unbeschädigt ist. Nach dem Öffnen muss sie sofort verwendet werden und kann nicht erneut gelagert werden.

	Die Decke darf nicht von selbst gefaltet werden.		Überwachen Sie regelmäßig die Hautreaktion.
	Befestigungsriemen, Klebeband, Gürtel oder zusätzliches Leinen dürfen nicht über der Decke verwendet werden.		Die erhitzten Stellen müssen nach oben zeigen, wie auf dem Etikett angegeben.
	Die Decke darf nicht bei Patienten mit schwerer peripherer Durchblutungsstörung verwendet werden.		



Rev 0 - 12/2025